



Vérifiez les signes d'arrêt cardiaque soudain :  perte de conscience  
 respiration anormale

**1 TIREZ**

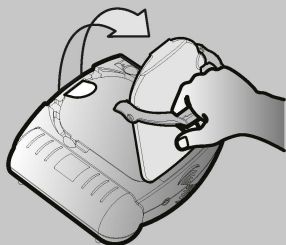


AIDE-MÉMOIRE

**2 PLACEZ**


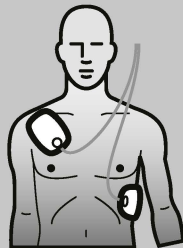


**3 APPUYEZ**

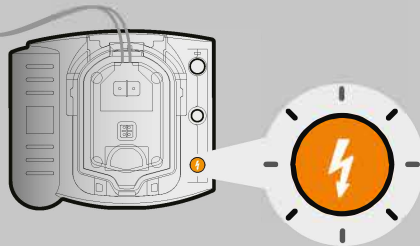


## INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

Pour commencer :Tirez la poignée.  
Retirez les protections.

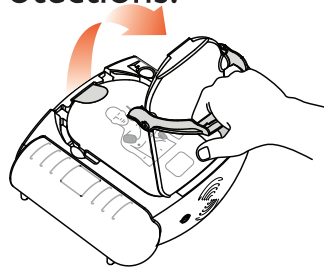
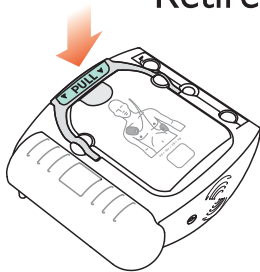


1

Mettez nu le thorax.  
Nettoyez et séchez la peau, au besoin.


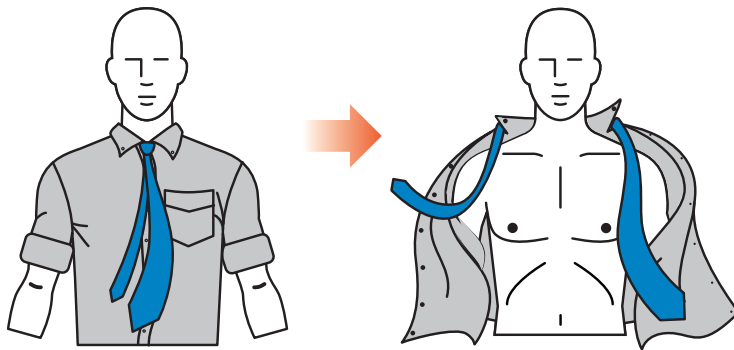


Décolliez la pellicule adhésive et sortez les électrodes de la cartouche.

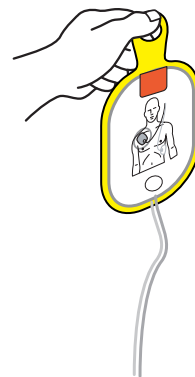
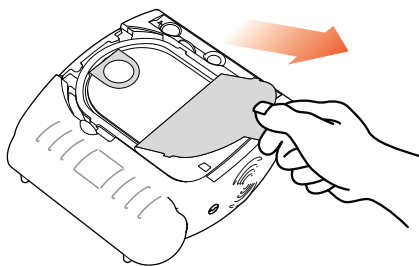


3

Décollez chaque électrode du revêtement jaune en plastique.

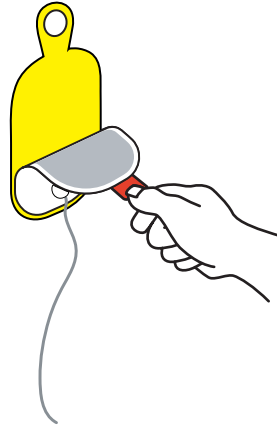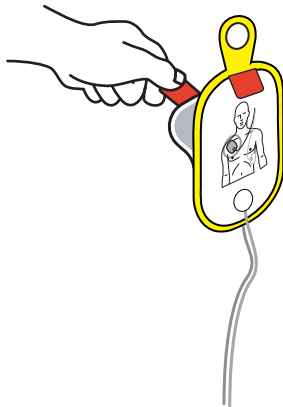

Placez les électrodes exactement conformément à l'illustration.

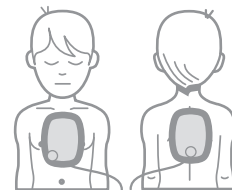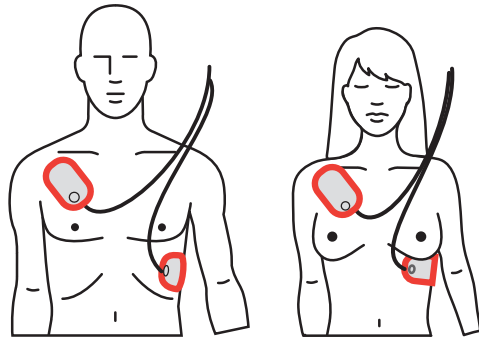


(0-8 ANS) < 25 kg

## Analyse ... Ne touchez pas le patient!




Pour délivrer un choc : appuyez sur le bouton **ORANGE** clignotant. Ne touchez pas le patient.

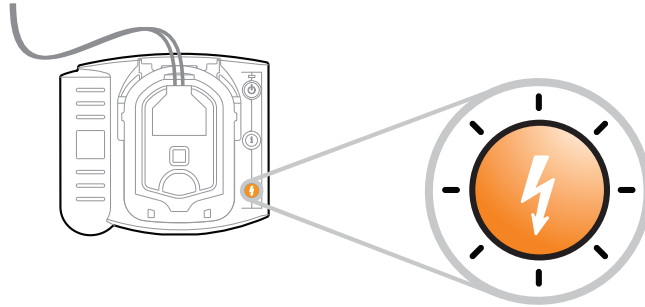




Pour l'aide à la RCP :  
appuyez sur le bouton **BLEU** clignotant.

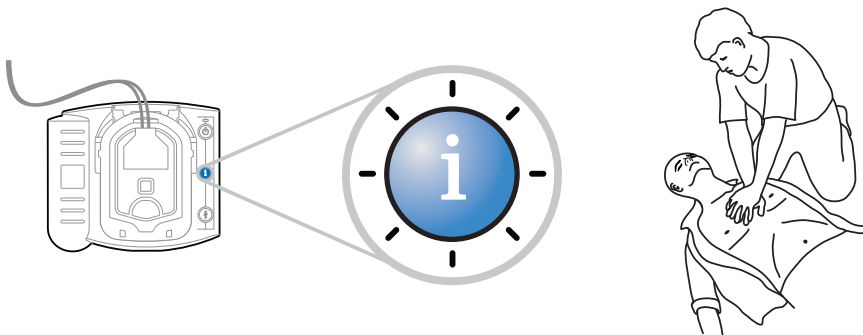


30 compressions • pincez le nez, penchez la tête • 2 inspirations complètes

Pour mettre l'appareil sous tension :  
appuyez sur le bouton **VERT** de Marche/Arrêt.

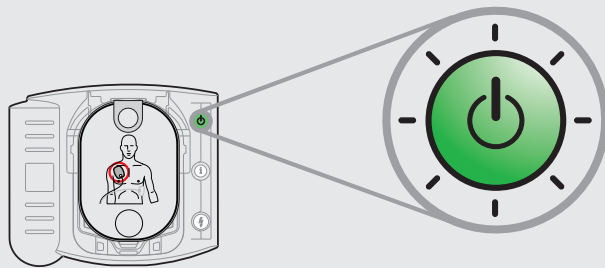

Si la cartouche a besoin d'être remplacée :  
faites glisser le loquet.

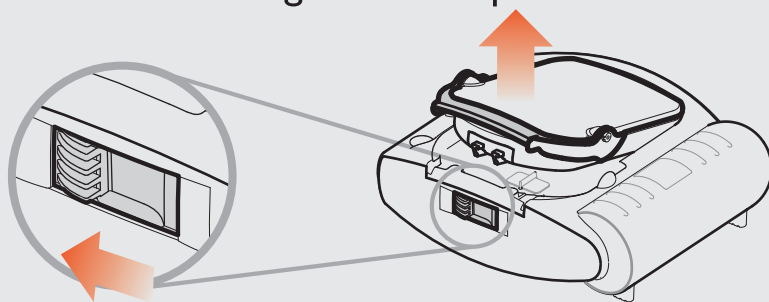

Imprimé aux États-Unis

Philips Medical Systems  
Seattle, WA 98121

Copyright © 2008  
Philips Electronics North American Corp

011835 REV VII

M 5 0 6 6 - 9 7 8 0 1



0 1 1 8 3 5 - 0 0 0 6

**PHILIPS**